

CÉGISMERTETŐ

A **BIONIKA** Medline Orvostechikai Kft. magyar-svéd tulajdonú cégcsoport tagjaként működik. 1989-ben alakult. Tulajdonosai svéd és magyar állampolgárságú magánszemélyek. 30 éves tapasztalattal rendelkezünk az orvosműszer-és implantátumfejlesztésben, -gyártásban és -kereskedelemben.

A BIONIKA mint kutató-fejlesztő, gyártó és forgalmazó egyaránt jelen van a fogászat, szájszészet, traumatológia, ortopédia és rehabilitáció orvosszakmai területein.

Célkutatásunknak és felfogásunknak megfelelően nagy jelentőséget tulajdonítunk a „BIONIKA” szónak, mely egy olyan tudományos gondolkodást jelöl a biológia, a technika és az elektronika határmezsgyéjén, amely ötvözi e három területet a kutató-fejlesztő munkánk során.

Klinikai és technológiai tapasztalatok: Sikereinkhez hozzájárul a klinikai és technológiai tapasztalatok folyamatos feldolgozása, ötvözése és hasznosítása a fejlesztésben, visszacsatolva egészen a gyártóbázisig. Itt születnek a vevői igényeknek legjobban megfelelő megoldások, konstrukciók, melyeket folyamatos fejlesztés alatt tartunk.

Fejlesztés: A BIONIKA tulajdonosai nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos termék- és technológiai fejlesztésekre. Termékeinket orvosok és mérnökök szoros együttműködésével fejlesztjük, mely által biztosítani tudjuk azok folyamatos világszínvonalú minőségét és gyakorlati használhatóságát egyaránt.

Minőség: A vevőink által elvárt minőséget a harmonizált Európai Uniói jogszabályok szerinti tervezés, gyártás és minőségirányítás garantálja. A BIONIKA Medline Kft. az EN ISO 9001 és az ISO 13485 minőségirányítási rendszer szerint működik. Termékeink CE-jellel rendelkeznek.

Garancia: Az implantátumfelépítmény-alkatrészek garanciája 3 év. Az implantátum beültetést követően - a csontosodási folyamat kockázatát a BIONIKA magára vállalva - az ok-okozati összefüggésektől függetlenül a vásárlást követő egy éven belül cseregaranciát biztosítunk. Termékeinkre hosszú távú, az implantátumokra 10 éves garanciát adunk.

HARAPÁSVÉTELI FEJEK MULTI-UNIT SZINTRE

A Multi-Unit szintű harapásvételi fejek csavarmenettel rögzülnek a Multi-unit fej kúpjához. Ettől eltekintve alkalmazásuk és méretválasztékuk a kiadvány belső oldalain látható implant szintű fejekkel rögzíthető.



A BIONIKA Medline Kft. **Rátonyi József** fogtechnikus alapvetően új elképzelése alapján fejlesztette ki a harapásvételi fejeket az implantátumos fogpótlások precíz beállításához implant szintű és Multi-Unit szintű fogművekhez.

SZAKMAI TANÁCSADÓ:



Rátonyi József - fogtechnikai szakértő

Rátonyi fogtechnika

www.fogtech.hu

fogtech@vipmail.hu

+36 70 368 0787

RENDELÉSFELVÉTEL:

www.bionika.hu

info@bionika.hu

+36 70 670-6875





BIONIKA

High-tech medical innovation

Q B I O P O Z
A PONTOS HARAPÁSVÉTEL

A HARAPÁSVÉTELI FEJEK
AZ IMPLANTÁTUM FELÉPÍTMÉNYEK ÚJ NEMZEDÉKE

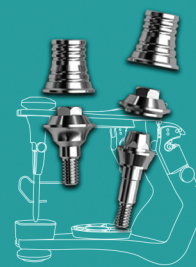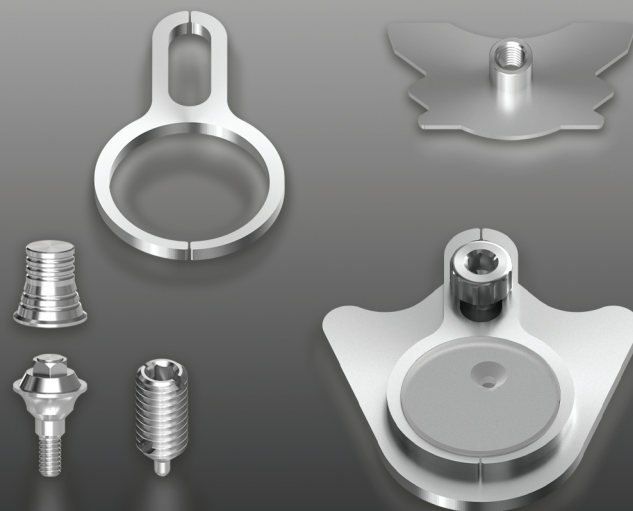

NYÍLHEGYREGISZTRÁCIÓHOZ
IMPLANTÁTUMOS
SZÁJ ESETÉN

K21-MD07-001

HARAPÁSVÉTELI FEJEK IMPLANTÁTUM SZINTRE

A harapásvételi eszközökre azért van szükség, hogy meg tudjuk állapítani az alsó és felső fogak rágófelszínének találkozási síkját.

ALKALMAZÁS

A harapásvételi fejeket becsavarjuk az implantátumokba. A harapásvételi sapkákat felhelyezzük a harapásvételi fejekre. **A sapkák mágnesesen rögzülnek.**



A kitöltéshez az ilyenkor szokásos anyagokat használjuk. Az alaplemezeket és a rajzoló csapot rögzítjük a kitöltő anyagba.



Kérjük a páciens, hogy érintse össze a sablon elemeit, majd enyhén mozgassa állkapcsát előre-hátra és mindkét oldalirányba, miközben a rajzoló csap az alsó lemezre támaszkodik. A mozgítás nyoma az alsó lemezen kirajzolódik és létrejön a jellegzetes nyílhegy rajzolat.

Az alsó és felső harapási sablont rögzítsük egymáshoz úgy, hogy a csap vége a nyílhegy csúcsára essen. Miután a lenyomatokról elkészültek a gipszminták, illesszük össze az alsó és a felső mintát a meghatározott helyzetnek megfelelően és rögzítsük az artikulátorba.



A HARAPÁSVÉTELI FEJEK VÁLASZTÉKA


A harapásvételi fej **bármely implantációs rendszerhez** elérhető. A fejkialakítás minden rendszer-nél megegyezik, a csatlakozási felület úgy van kialakítva, hogy az adott implantátum rendszerhez tökéletesen illeszkedjen.

A fejkialakítás egy 60°-os Multi-unit kúpos megoldás (90°-os kialakítással is elérhető), melyben a felső Multi-unit kiscsavar helyett egy mágnes helyezkedik el. Ez biztosítja a harapásvételi sapka biztos illeszkedését, ugyanakkor a könnyű eltávolítást is.

A harapásvételi fejek elérhetőek közvetlenül az implantátumba betekerhető **(implantátum szintű)** változatban, valamint Multi-unit fejekre helyezhető **(Multi-unit szintű)** kialakításban is.

Méretválaszték - sulkus méretek (mm)

0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

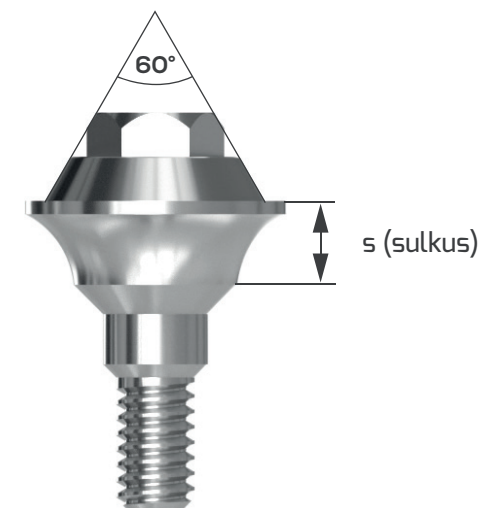

A harapásvételi fejek egyéb méreteinek választéka az alkalmazott implantátum rendszer méreteinek megfelelően változik.